


Acest ghid este destinat pentru a oferi o vedere de ansamblu a operatiunilor disponibile pe sistemul Intercall 700.

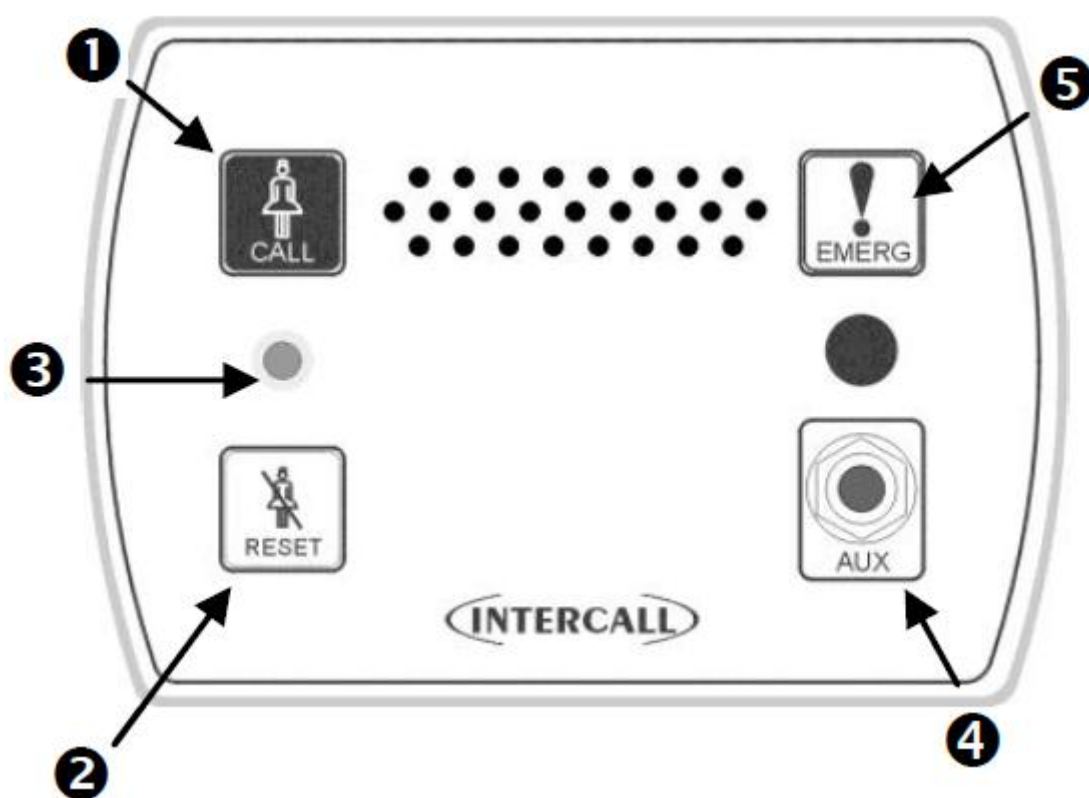

1. Buton apelare
2. Buton reset
3. Led confirmare
4. Mufa Jack
5. Buton urgenta

Intercall 700/Statie apelare: tipuri de apel si semnificatia acestora

Apelare – Apel standard

Prioritate – Apel standard nepreluat


Asistenta – Personalul necesita asistenta

Urgenta – Personalul necesita asistenta de urgenta


Atac – Membru al personalului sub amenintare si necesita asistenta de urgenta

Prezent – Membru al personalului prezent la locatie


Vizita – Un membru al personalului a preluat apelul de la unitatea de afisaj si se indreapta spre locatie

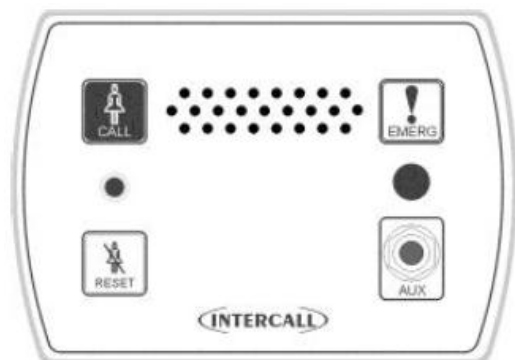


Apel standard – acesta poate fi efectuat prin actionarea "**Buton apel**", prin actionarea butonului tip para sau indepartarea acestuia din mufa Jack, buton cu snur de tavan sau actionare prin telecomanda. Ledul rosu de confirmare clipeste pe statia de apelare.

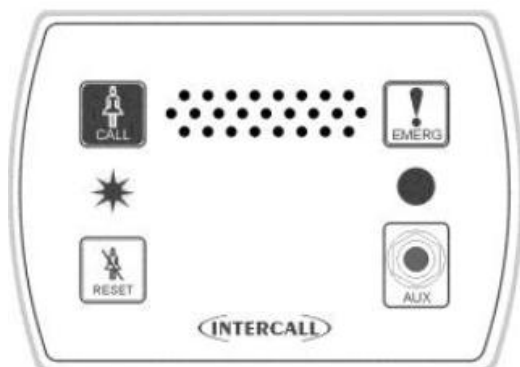


Prioritate apel - un "Apel Standard" care a ramas nepreluat o perioada prestabilita de timp devine automat un apel cu prioritate iar ledul clipeste rapid.

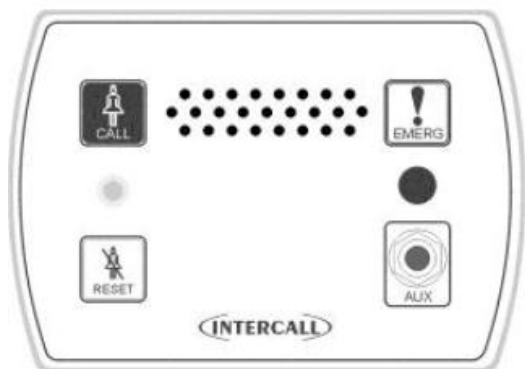

Personal Present – dacă un membru din personal intra în încăpere, trebuie să acționeze butonul **"Reset"** de pe stația de apelare. Stația de apelare este acum în modul **"Personal Present"**, iar ledul de confirmare verde rămâne aprins. Când acesta părăsește încăperea, trebuie să acționeze butonul **"Reset"** din nou pentru a stinge ledul și pentru a anula mesajul **"Personal Present"**.

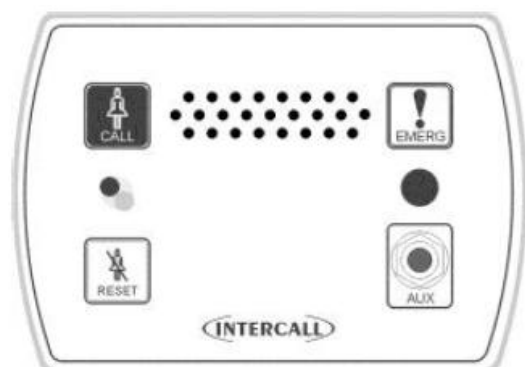


Apel asistentă personal – acesta poate fi produs doar când stația de apelare este în modul **"Personal Present"** și ledul de confirmare verde este aprins. Apăsarea butonului de apel va genera un apel **"Necesita Asistentă"**, iar ledul va clipi roșu/verde. Pentru anularea apelului se apasă butonul **"Reset"**. Stația de apelare este acum în modul **"Personal Present"**, iar ledul verde de confirmare este aprins. Pentru anularea modului **"Personal Present"** apăsați butonul **"Reset"** până când ledul s-a stins.

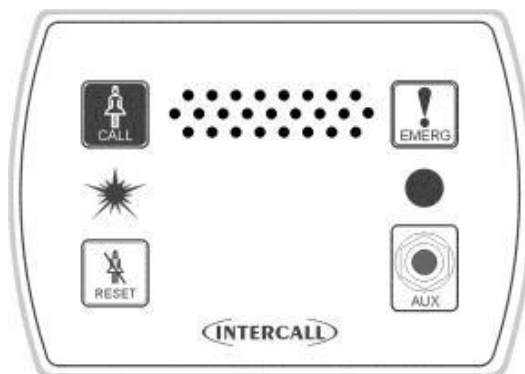

Urgentă personal/accident – acesta mod poate fi activat prin apăsarea simultană a butoanelor **"Buton Apelare"** și butonul **"Reset"** de pe stația de apelare. În acest mod ledul roșu de confirmare trebuie să clipească rapid. Pentru anularea apelului de urgență se apasă butonul **"Reset"**. Stația de apelare este acum în modul **"Personal Present"**, iar ledul verde este aprins. Pentru anularea modului **"Personal Present"** apăsați butonul **"Reset"** până când ledul s-a stins.

Apel personal sub amenințare – poate fi generat doar printr-o telecomandă de la stația de apelare. Aceste apeluri sunt semnalizate prin clipirea rapidă a ledului roșu și pot fi resetate doar printr-o telecomandă sau de pe o unitate de afișaj **"Guardian"** când este integrat cu sistemul Intercall 700/Guardian.

Comunicare cu alți membri din personal - localizarea și comunicarea cu alți membri din personal este ușoară cu sistemul Intercall 700. Apăsați butonul **"Reset"** și puteți face legătura cu alte unități de afișaj și alte stații de apelare în modul **Personal Present**.

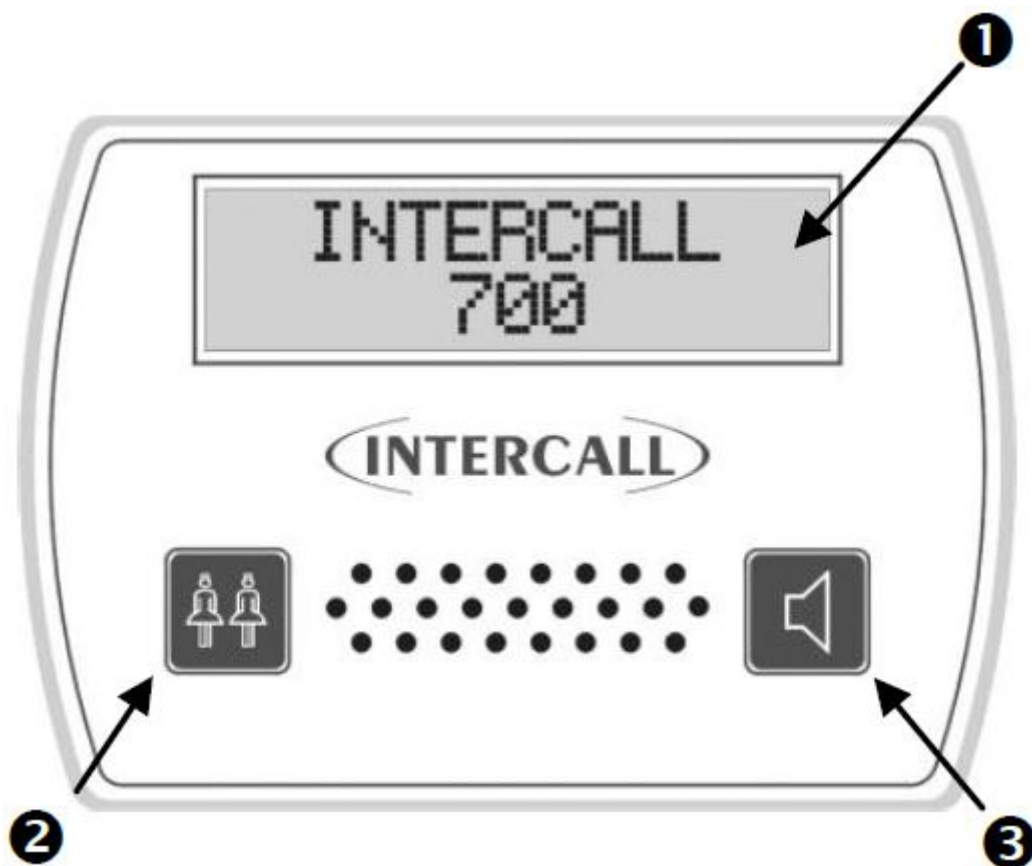

1. Afisaj Display
2. Buton Afisare Personal
3. Acceptare apel/Interfonie

Intercall 700: tipuri de apel si semnificatia acestora

Apelare – Apel standard

Prioritate – Apel standard nepreluat


Asistenta – Personalul necesita asistenta

Urgenta – Personalul necesita asistenta de urgenta


Atac – Membru al personalului sub amenintare si necesita asistenta de urgenta

Prezent – Membru al personalului prezent la locatie


Vizita – Un membru al personalului a preluat apelul de la unitatea de afisaj si se indreapta spre locatie

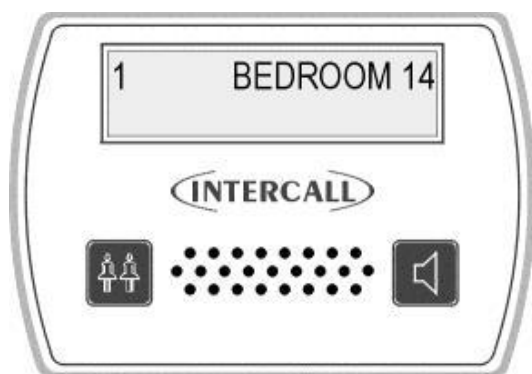


Apel Standard – va genera un ton scurt la fiecare doua secunde. Numarul afisat in partea stanga reprezinta pozitia in lista de asteptare. cel mai mic numar reprezinta cel mai vechi apel. In partea dreapta este afisata locatia. In exemplu avem un apel din "Bedroom 14".

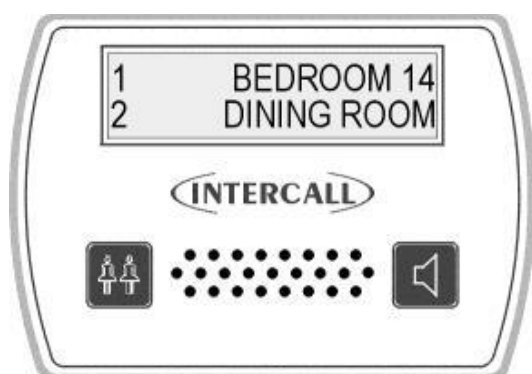

Apeluri multiple – cand exista mai multe apeluri active, acestea sunt afisate in lista in ordinea primirii acestora. In exemplul din imagine exista doua apeluri, "Bedroom 14" este apelul cel mai vechi si apare in lista pe pozitia 1. Apelul din "Dining Room" este mai recent si apare in lista pe pozitia 2.

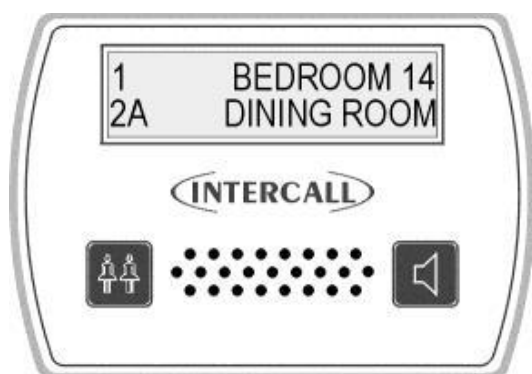


Apel Asistenta – un apel "Asistenta" va genera doua tonuri scurte la fiecare doua secunde. In imaginea din stanga avem un apel standard din "Bedroom 14" si un apel "Asistenta" din "Dining Room".

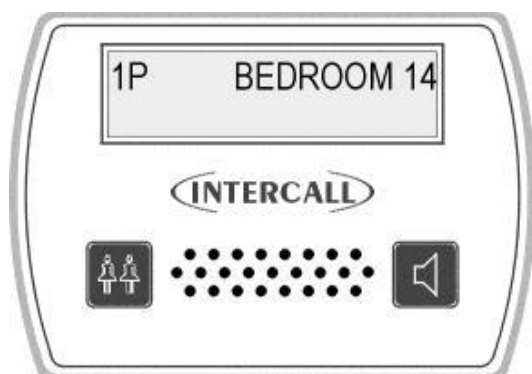


Prioritate apel – daca un apel standard ramane nepreluat, acesta devine automat apel cu prioritate. Un apel cu prioritate este indicat prin litera "P" dupa numarul apelului. In acest mod optiunea de interfonie este indisponibila, iar un membru al personalului trebuie sa reseteze statia de apelare. Cand un apel cu prioritate este activ, apelurile standard si asistenta sunt stocate in memorie pana la resetarea statiei de apelare.




Urgenta personal – un apel de "Urgenta" va genera o serie de tonuri scurte si rapide. In imagine cuvantul "**Urgenta**" indica apelul de urgenta. Optiunea de interfonie nu este disponibila in acest mod, iar personalul trebuie sa reseteze manual statia de apelare de la care s-a efectuat apelul. Cand un apel de "atac" sau "urgenta" este activ, restul apelurilor vor fi stocate in memorie pana la resetarea acesteia.

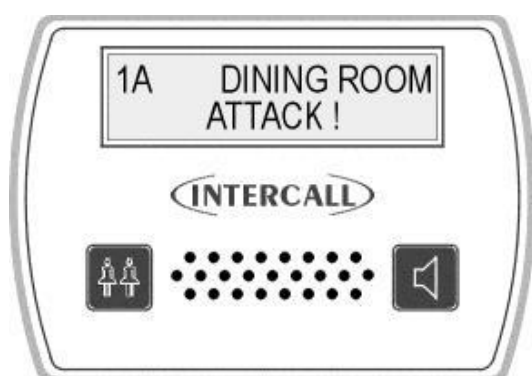


Apel atac personal – va genera o serie de tonuri rapide si scurte. Pe unitatea de display va aparea cuvantul "Attack", similar cu apelul de urgenta. Optiunea de interfonie nu este disponibila in acest mod, iar apelul nu poate fi resetat decat de la o telecomanda sau folosind un Guardian display. Cand un apel de "atac" sau "urgenta" este activ, restul apelurilor vor fi stocate in memorie pana la resetarea acestuia.

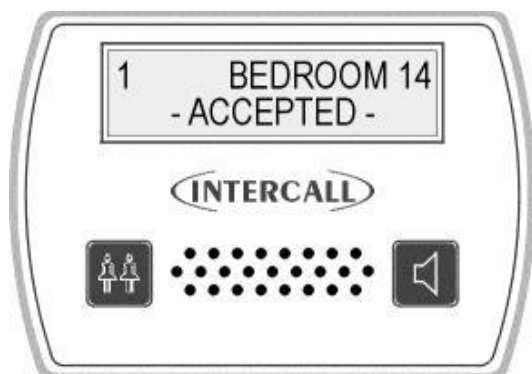


Acceptare apel(acceptare/confirmare apel) - pentru a evita situatia in care mai multi membrii ai personalului raspund la acelasi apel, apelurile pot fi "**acceptate**" de pe orice unitate display. Pentru a accepta un apel, asteptati pana cand apelul dorit este primul in lista de pe unitate de afisaj si apasati butonul "**Acceptare apel**". Numai apelurile standard si asistenta pot fi acceptate.

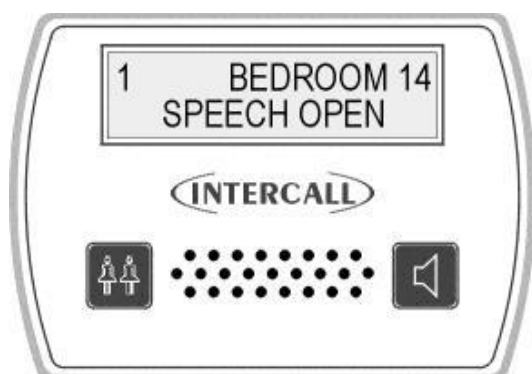

Acceptare apel/comunicare cu apelantul – pentru a accepta un apel si a comunica cu apelantul, procedura este similara cu acceptarea un apel. Asteptati pana cand apelul pe care doriti sa il preluati este primul in lista, dupa care apasati butonul "**Acceptare apel**". Dupa ce apare mesajul "speech open" veti putea auzi apelantul. Pentru a raspunde tineti apasat butonul "Acceptare apel". Pentru a incheia conversatia apasati butonul "**Show Staff**". (Canalul de comunicare se inchide automat dupa 60 de secunde).

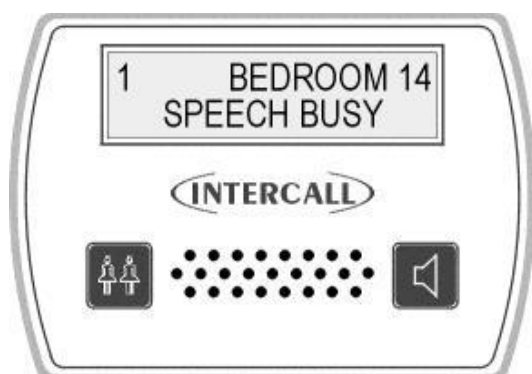

Linie ocupata – pentru a anunta toti utilizatori ca linia este ocupata, "Speech Busy" va aparea pe toate unitatile de afisaj. Pe restul unitatilor de afisaj, apelurile primite vor fi afisate pe linia de sus a afisajului(apelurile pot fi preluate), dar functia de interfonie nu este disponibila

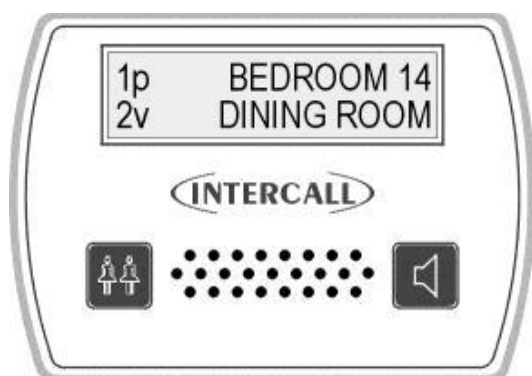


Localizare personal – pentru localizarea personalului, apasati butonul "**Afiseaza Personal**" de pe unitatea de afisaj. In imaginea din stanga un membru al personalului se afla in "Bedroom 14", litera "**p**" indicand acest lucru. Un membru al personalului a acceptat un apel si "viziteaza" apelul din "TV lounge", litera "**v**" indicand acest lucru.

Comunicare cu personalul – pentru a comunica cu personalul tineti apasat butonul "Talk" si veti putea comunica cu toate celelalte unitati display si statii de apleare aflate in modul "Personal Present". Acest lucru se poate intampla daca nu exista nici un apel activ, iar pe unitatea display nu apare mesajul "Speech Busy".

ID Utilizator/Intercall 700




Cum apare pe display apelantul - cu sistemul Intercall 700, exista posibilitatea de a afisa numele apelantului cat si locatia acestuia. Aceasta functie se numeste ID Utilizator. Pentru a folosi aceasta functie, apelantul trebuie sa faca apelul de la o telecomanda care are atribuit numele acestuia. Toate sisteme Intercall 700 sunt echipate cu receptoare care accepta aceste semnale.

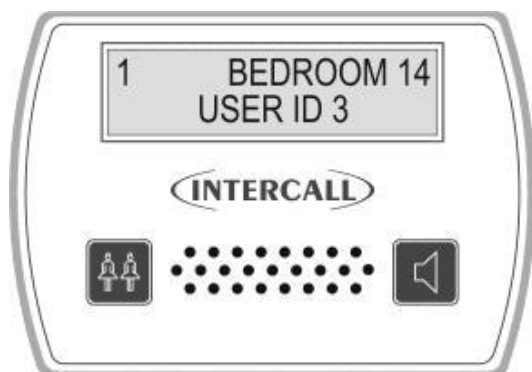

Apeluri Standard/Asistenta/Prioritate - principala deosebire fata de optiunea ID Utilizator, este faptul ca ambele linii de pe display sunt folosite pentru fiecare apel. Partea superioara reprezinta locatia, iar in partea inferioara este afisat ID-ul Utilizatorului. Mai sus este prezentat un apel standard din "Bedroom 14" efectuat de "Mary Robinson". In partea stanga este prezentat un apel standard.




Descrieri auxiliare - patru ID-uri Utilizatori sunt rezervate ca ID Utilizatori Sistem. Acestea accepta descrieri comune alocate altor dispozitive conectate la statia de apelare. Ex: un buton de tavan. Pe afisaj va aparea numele dispozitivului alocat + locatia.

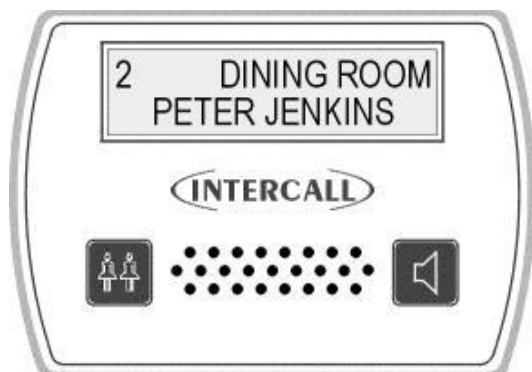


Mai mult de un apel activ - cand exista mai multe apeluri active, acestea sunt afisate pe unitatea display. Fiecare apel este afisat impreuna ID-ul corespunzator. In partea dreapta avem al doilea apel activ cu numarul "2", iar acum este de la "Peter Jenkins" din "Dining Room".




Lipsa ID Utilizator - daca o statie de apel nu este activata de la telecomanda, nu este posibil sa identificam apelantul. In aceasta situatie apare mesajul "No User ID".

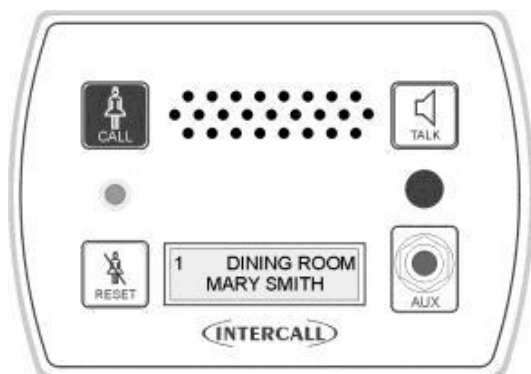


Unitate apelare/display - unitatea L762 apelare/display combina caracteristicile statiei de apelare L753 si a unitati display L758. Apelurile sunt efectuate la fel ca si la statile de apel mentionate mai devreme, singura diferenta fiind lipsa butonului de urgenta (Apelurile de urgenta sunt efectuate prin apasarea simultana a butoanelor de reset si apelare). Unitatea display este activa doar cand statia de apelare este in modul "**Personal Present**" si lucreaza in mod similar cu unitatea display descrisa mai sus.

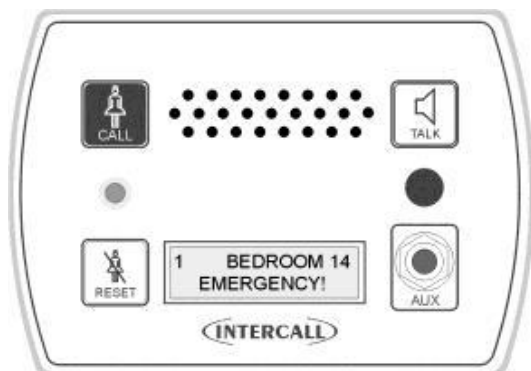

Daca nici un apel nu este activ pe display va aparea mesajul "Intercall 700". Daca un apel "**Urgenta**" sau "**Atac**" este activ, pe unitatea display va aparea acest apel, dar sirena nu se va activa decat daca statia de apelare este in modul "**Personal prezent**".

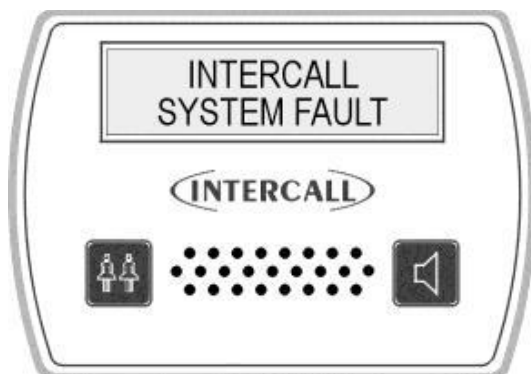

Afisare avarii sistem – Sistemul este monitorizat, iar in cazul unei avarii pe display apare mesajul "System Fault", iar sirena va suna pentru confirmare.

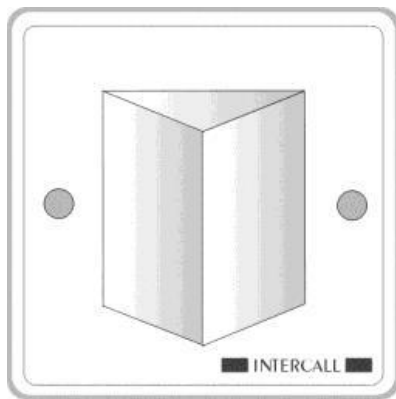

Lampa de usa - elemente optionale localizate in afara incaperii cu rolul de a afisa statusul statiei de apelare din incapere. Acestea au doua leuduri rosu/verde.

Modele semnalizare led:

Apelare – semnalizare lenta intermitenta rosie

Prioritate – semnalizare rapida intermitenta rosie


Asistenta – Clipeste rosu/verde

Urgenta – Clipeste rapid ledul rosu

Atac – Ledul rosu clipeste foarte rapid

Prezent – Led verde aprins

Apel acceptat – Ledul verde clipeste rar

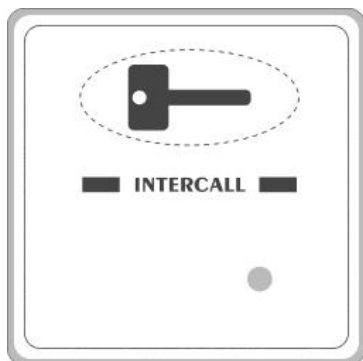

Monitorizare usa si puncte control acces – monitorizare usa incendiu si intrare principala pentru intrare/iesire neautorizata. O cartela permite usii sa fie deschisa de personal autorizat fara ca sirena sa genereze o alarma si permite usii sa fie lasata deschisa daca este necesar.



Statie apelare secundara – similara cu statia de apelare standard, aceste statii sunt folosite in camere cu mai multe paturi. Aceste statii permit doar apeluri standard de la butonul chemare asistenta sau prin dispozitive atasate la mufa jack. Nu exista optiunea de reset, iar resetul se efectueaza doar de la statia de apelare standard din camera.



Reset secundar/Confirmare prezenta – acete statii sunt localizate langa usa incaperii sau in interiorul incintei pentru a confirma prezenta personalului sau pentru a reseta staita de apelare de la distanta. Nu exista optiunea de apelare de la aceste statii.

Butoane tip para – utilizate pentru efectuarea apelurilor de la statiile de apelare. Sunt disponibile in doua marimi: 2m si 4m, cu mufa jack la 90 de grade. Exista diferite tipuri de cleme care pot fi folosite pentru a asigura butonul de pat sau sifonier.

Telecomanda – utilizata pentru a efectua apeluri de la distanta fara a mai fi nevoie de fire. Toate modele de Intercall 700 sunt echipate cu receptor pentru telecomanda.